

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ФС ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ



Orlett®
вернет радость движения

Medical Line

Инструкция по применению ортопедических изделий



Бандажи на брюшную стенку
AB-309, AB-412



Бандажи Orlett медицинские на брюшную стенку, арт. АВ-309, АВ-412

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандажи Orlett медицинские на брюшную стенку, арт. АВ-309, АВ-412 обеспечивают легкую степень фиксации и поддержку передней брюшной стенки за счет нерастяжимого пелота, совмещаемого с проблемным участком, и натяжения эластичного материала, опоясывающего туловище. Способствуют формированию послеоперационного рубца, в том числе и глубокого (мышечного) за счет защиты и разгрузки соединительнотканного и мышечного аппарата передней брюшной стенки.

Модель Orlett, арт. АВ-412 отличается от модели арт. АВ-309 высотой. Высота модели Orlett, арт. АВ-309 – 23 см, арт. АВ-412 – 30 см.

Для удобства фиксации бандажи больших размеров модели Orlett, арт. АВ-309 и арт. АВ-412, начиная с размеров XL, снабжены двойным правым клапаном.

Показания к применению:

- ранняя мобилизация после операций на органах брюшной полости, включая кесарево сечение;
- профилактика образования послеоперационных грыж передней брюшной стенки (при слабости мышц, после больших разрезов);
- профилактика ущемления вправляемых послеоперационных грыж, грыж белой линии живота, пупочных грыж;
- может назначаться в период восстановления после нормальных родов, в качестве поддержки при опущении внутренних органов брюшной полости, почек, ожирения 3-4 степени (для подтяжки живота и улучшения силуэта в эстетических целях), при реабилитации после липосакции передней брюшной стенки, после пластических операций.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач.

Противопоказания:

- беременность;
- диафрагмальные грыжи;
- невправимые грыжи брюшной стенки;
- синдром портальной гипертензии.

Предупреждения:

- в случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача;
- людям с чувствительной кожей следует надевать бандаж на нижнее белье, плотно прилегающее к телу;
- при возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

Инструкция по применению

Конструкция бандажей:

Бандаж Orlett на переднюю брюшную стенку, арт. АВ-309 (рис. 1) и бандаж Orlett на переднюю брюшную стенку, арт. АВ-412 (рис. 2) состоят из:

1. эластичного пояса с застёжками-липучками «Велкро»;
2. нерастяжимого пелота.

Порядок надевания:



рис.1



рис.2

Бандажи Orlett, арт. АВ-309, АВ-412 надевают в положении лёжа перед подъемом с постели. Нерастяжимый пелот должен располагаться в области послеоперационного рубца или грыжевого выпячивания. При необходимости грыжевое выпячивание предварительно вправляется.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать бандаж слишком сильно, во избежание избыточного давления на ткани и нарушения кровообращения.

Правила подбора:

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая измеряется окружность талии (рис. 3).

Согласно полученным результатам подбирается необходимая модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

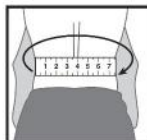


рис.3

Таблица подбора размеров:

Бандажи Orlett на брюшную стенку, арт.: АВ-309, АВ-412	
Размер	Окружность талии (см)
XS	до 75
S	75-85
M	85-95
L	95-105
XL	105-120
XXL	120-135
XXXL	более 135

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Правила ухода:

Ручная стирка при температуре не выше +40°C. Не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор. Не применять машинную стирку. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



Состав изделий:

Бандажи Orlett, арт. АВ-309, АВ-412: 15% вискоза, 10% полиуретановый поролон, 10% нейлон, 40% полиэстер, 10% хлопок, 15% спандекс.

Условия хранения:

Бандажи должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Бандажи утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

Комплектность:

Бандаж Orlett AB-309: ортопедическое изделие арт. АВ-309, инструкция по применению.

Бандаж Orlett AB-412: ортопедическое изделие арт. АВ-412, инструкция по применению.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции и правил эксплуатации.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09551 от 30.12.2011 г.
выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Производитель: Рехард Технолоджис ГмБХ

Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, д.14, стр. 1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.